



ALAB

Test Kataložu

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

İÇİNDEKİLER

1. TEST GİRİŞLERİ.....	3
2. TEST SONUÇLARINI ETKİLEYEN ETMENLER	4
3. GLUKOZ YÜKLEME TESTLERİ	6
(OGTT-ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ)	6
4. Testlere Göre Sık Kullanılan Örnek Tüpleri;.....	6
5. Koagülasyon Testleri İçin Kan Alımında Dikkat Edilecek Hususlar.....	7
6. İDRAR ÖRNEKLERİNİN ALINMASI	8
6.1. Tam İdrar Tetkiki	8
6.2. 24 Saatlik İdrar Örneğinin Toplanması.....	8
7. ALAB LABORATUVARI NUMUNE RED KRİTERLERİ	11
8. SONUÇ RAPORLANMASI VE RAPORLAMA SÜRELERİ.....	12
9. Laboratuvara gelen numunelerin saklanması ve ilave istemler	12
10. Çalışılan testler	13
9. DIŞ LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TESTLER.....	116

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

1.TEST GİRİŞLERİ

Test girişleri için laboratuvar bilgi yönetim sisteminde (LBYS) hasta sayfasında yer alan “tetkik” menüsü seçilerek tetkik giriş sayfası açılır. Burada hangi test/testler istenmişse adı, kısaltması veya kodu girilerek istek yapılabilir. Hastalardan alınan test materyalleri laboratuvara gönderilir. Onay sonrası her yeni test isteği için lütfen laboratuvar ile iletişime geçin. Kurumsal kayıtlar ile ilgili video www.alab.com.tr adresinden izlenerek bilgi alınabilir.

1.1. TEST TALEP FORMALARININ DOLDURULMASI VE NUMUNELERİN ETİKETLENMESİ

Test Talep Formu kullanıyorsanız;

Bizim tarafımızdan gönderilen Test Talep Formu’nda analiz edilecek testler işaretledikten sonra lütfen aşağıda yer alan ve formda bulunan bilgileri de doldurunuz;

- ✓ Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve doğum tarihi, adresi ve T.C. kimlik numarası
- ✓ Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
- ✓ Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
- ✓ İstemi yapan doktorun adı, telefonu, adresi
- ✓ Klinik tanı veya ön tanısı
- ✓ İstenen testler
- ✓ Numune türü ve alındığı anatomik bölge
- ✓ Numunenin alındığı tarih ve saat
- ✓ Varsa aldığı ilaçlar
- ✓ Varsa gebelik durumu
- ✓ 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre

Eğer test taleplerinizi internet üzerinden laboratuvar bilgi sistemine giriş yapıyorsanız;

Test istemlerinizi kendi sisteminizden yaptıktan sonra otomatik olarak bizim sistemimizde de görülecektir. Bu durumda siz sadece gerekiyorsa barkodlarını barkod yazıcıdan çıkarıp, serumları ayrılmış numuneler üzerine yapıştırıp laboratuvara ulaştırınız. Barkodlarını alamadığınız numunelerin üzerlerine açık bir şekilde hasta adını soyadını yazmanız gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan bilgilerin kendi bilgisayarınızda da olmasını sağlayınız.

- ✓ Numune türü ve alındığı anatomik bölge
- ✓ Numunenin alındığı tarih ve saat
- ✓ Aldığı ilaçlar
- ✓ Gebelik durumu
- ✓ 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim ve toplandığı süre

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

- ✓ Numunenin laboratuvara ulaştığı tarih ve saat
- ✓ Numuneyi laboratuvarda kabul eden kişinin adı soyadı

2. TEST SONUÇLARINI ETKİLEYEN ETMENLER

Yaş ve Cinsiyetin Etkisi: Hastanın yeni doğan, puberte, yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon, enzim, lipidler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. Örneğin: alkalen fosfataz, kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Menstrüel döngü sırasında da kadınların hormon değerleri çok değiştiğinden LH, FSH gibi testler için kan gönderilirken, döngü gününün de belirtilmesi unutulmamalıdır. CA-125 menstrüel periyotta normalin 2 katına çıkabilir.

Açlık Durumu: Genellikle laboratuvar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. Kırk sekiz saatten uzun süren açlık, serum bilirubin düzeylerinde artışa yol açmaktadır. Yetmiş iki saatten uzun süren açlık, kadınlarda açlık kan şekeri düzeyinin 45 mg/dL altında bulunmasına, erkeklerde ise trigliserid ve serbest yağ asidlerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Besinlerin Etkisi: Et yenmesi plazma potasyumunu, trigliseridleri ve ALP enzimini yükseltir. ALP enzimi ayrıca B Rh ve O Rh kan grubuna sahip kişilerde özellikle yağlı yemeklerden 2 saat sonra artış göstermektedir.

Proteinden zengin gıda alımı; serum üre, amonyak ve urat düzeylerini artırmaktadır. Muz, domates ve avokado gibi gıdalar serotonininden zengindir ve idrarla 5-HIAA atılımını artırmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya plazmada bulanıklık yaparak ölçüm yapılan metodların yanlış sonuçlar vermesine neden olabilmektedir. Kanda glukoz, trigliserid, kolesterol ve elektrolitler (sodyum, potasyum, klor), folat, vitamin B12, magnezyum gibi testler için kan örneği 10-12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır.

Egzersiz Etkisi: Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri izlenir. Egzersiz sonrası kısa süreli olarak laktat, CK, AST, LDH yükselir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi olarak CK, AST, LDH, plazma testesteronu, lutenizan hormonu yükselttiği bilinmektedir. Bu nedenle tetkik için laboratuvara gelmeden önce AĞIR VE ZORLAYICI EGZERSİZDEN KAÇINILMALI, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olunması önerilir.

Alkol alımı; Laktat, urat ve trigliserid düzeylerini, kafein ise serbest yağ asidlerini artırmakta ve katekolamin salınımına neden olmaktadır. Kronik alkol tüketiminde

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

gama-glutamil transferaz, ortalama eritrosit hacmi, ürat ve yüksek yoğunluklu kolesterol (HDL) artışı görülmektedir.

Sigara içimi ile; karboksihemoglobin artmakta, katekolamin ve kortizol düzeyleri artmaktadır. Ayrıca sigara içimi eritrosit ve lökosit sayısı ile ortalama eritrosit hacminin yüksek bulunmasına neden olmaktadır. Birçok ilaç Laboratuvar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir.

Diurnal Ritm: Gün içerisinde bazı analitlerin salınımı, metabolizması ya da dolaşıma çıkmasında değişiklikler görülebilir. Mesela serum demiri 08.00-14.00 saatleri itibarıyla aynı hastanın iki ayrı zamandaki numunesine göre %50 gibi fark gösterebilir. Sabah 06.00 civarında serum kortizol düzeyleri pik yaparken, gece 00.00 de en düşük düzeylere inmektedir. Ayrıca öğleden sonra yapılan glukoz tolerans testlerinde glukoz değerleri sabah yapılanlara göre biraz daha yüksek çıkar. Kortizol, demir, vitamin B12, folat, TSH vb.testlerde günlük biyolojik değişkenlik çok belirgin olabilir. Bu nedenle, özellikle bu testler olmak üzere Laboratuvar tetkikleri için sabah açlık kan örneğinin verilmesi önerilir.

Stres ve anksiyete, hormon salınımını ve asid baz dengesini etkilemekte, lökosit sayısı, laktat ve serbest yağ asidi düzeylerini yükseltmektedir.

Postürün ve uzun süren turnike uygulamasının etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre 600-700 ml daha azdır. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir. Gerçek neden kanın proteinsiz sıvısının doku arasına geçmesi olup plazma hacminde önemli farka neden olur. Buna paralel olarak enzimler ve protein hormonlar dâhil tüm proteinler, albumin, proteinlere kısmen bağlı kalsiyum, bilirubin, kolesterol ve trigliserid düzeyleri ve proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir.

Yüksek ateş, serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler.

GENEL SAĞLIK TARAMASI İÇİN 10-12 SAATLİK AÇLIK SONRASI SABAH KAN VERİLMESİ,
TEST İÇİN KAN VERECEK KİŞİLERE; GECE SAAT 21:00'DEN SONRA SU HARIÇ HİÇBİR ŞEY
YEMEMELERİ VE İÇMEMELERİ, İHTİYAÇ DUYDUKLARI MİKTARDA SU ALABİLECEKLERİ VE
BU SÜRE BOYUNCA SİGARA, ÇAY, KAHVEDEN SAKINMALARI,

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

TETKİK İÇİN LABORATUVARA GELMEDEN ÖNCE AĞIR VE ZORLAYICI EGZERSİZDEN
KAÇINILMASI, KAN VERMEDEN ÖNCE YARIM SAAT KADAR DİNLENİLMESİ,

DÜZENLİ KULLANILAN İLAÇLAR VAR İSE KESİLMEDE ÖNCE DOKTORA DANIŞILMASI
ÖNERİLİR.

3. GLUKOZ YÜKLEME TESTLERİ (OGTT-ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ)

50 gram şeker yükleme testi: 24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti (şeker hastalığı) için yapılmaktadır. 50 gr. glukoz su içerisinde eritilir, içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır.

75 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması ve 3 gün karbonhidrat içeren bir diyet yapılması gereklidir. İlk önce açlık kan şekeri bakılır 75 gram glukoz suda eritilir, içildikten 2 saat sonra hastanın kanı alınır.

100 gram şeker yükleme testi: 50 gr. şeker yükleme testi anormal olan hastalar ile gebelik diyabeti için risk faktörü taşıyanlara yapılır. Hastanın aç olması ve 3 gün karbonhidrat içeren bir diyet yapılması gereklidir. İlk önce açlık kan şekeri bakılır. 100 gram glukoz suda eritilir, içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır.

Şeker yükleme testi için, test öncesi 3 gün yeteri kadar karbonhidrat alınması(en az 150 gr/gün karbonhidrat) bu testi etkileyecek ilaç alınmaması ve test sırasında su, sigara vs içilmemesi ve yenmemesi gerekir.

4. TESTLERE GÖRE SIK KULLANILAN ÖRNEK TÜPLERİ;

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Kan Alım Hacmi	Renk Kodu	Tüp Çesidi	Kullanım Alanları	Ters Çevirme	Santrifüj Koşulları
		Kan Kültürü	Anaerobığın takip ettiği aerobik - eğer her iki kültür şişesi için de yeterli kan yoksa, sadece aerobik olanı kullanın		
1.8 ml 2.7 ml 4.5 ml		Sodyum Sitrat	Koagülasyon çalışmaları için	3 - 4 kez	Devir: 2000 - 2500g Süre: 10-15 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
1.8 ml 1.8 ml 2.4 ml 5 ml		Sodyum Sitrat ESR	Sedimentasyon çalışmaları için	8 - 10 kez	
2 ml 4 ml 6 ml 10 ml		Serum / Plastik	Serum çalışmaları için	5 - 6 kez	Devir: ≤ 1300g Süre: 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
2.5 ml 3.5 ml 5 ml 8.5 ml		SST™ II Advance	Serum çalışmaları için (Jelli)	5 - 6 kez	Devir: 1300 - 2000g Süre: 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
3 ml 4 ml 6 ml 8 ml		Heparin	Plazma çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre: 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
2 ml 3 ml 4 ml 6 ml		EDTA	Hematolojik çalışmalar için	8 - 10 kez	
4 ml 6 ml		Cross Match	Cross Match çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre: 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
2 ml 4 ml		Florür Oksalat, Florür EDTA	Glukoz çalışmaları için Glukoz, Laktat, HbA1c çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre: 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
7 ml		Eser Element	Eser Element çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre: 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı

Hemoliz, eritrositlerin parçalanmasıdır. Hemoliz sonucunda, eritrosit içindeki maddeler seruma geçerler. Serumda hemogloblin konsantrasyonu 20 mg/dL'nin üzerinde olursa hemoliz olduğu gözle anlaşılır.

Eritrositlerden salınımı sonucu yüksek ölçülen parametreler	
Potasyum	Magnezyum
LDH	AST
Protein	Demir
Fosfat	Amonyak
Analitik etkileşim sonucu yüksek ölçülenler	
Total Kolesterol	Trigliserid
CK	CK-MB
Analitik etkileşim sonucu düşük ölçülenler	
Bilirubin	Albumin
Karoten	İnsülin

5. KOAGÜLASYON TESTLERİ İÇİN KAN ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Enjektör ile kan alınması durumunda düşük hacimdeki (2 ml) enjektörler kullanılmalıdır. Hava sızdırmamasına dikkat edilmelidir.

Enjektör ile alınan kan enjektör iğnesi çıkartılıp koagülasyon tüpünün kapağı açılarak normal bir hızda tüp aktarılmalıdır.

Enjektörden koagülasyon tüpüne kan aktarımı 1 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.

Turnike uygulamasında, hasta kolu şiddetle sıkılmamalı ve koagülasyon tüpüne kan alımına başlar başlamaz turnike çözülmalıdır.

Eğer birden fazla tüpe kan alınacaksa kan alımında belirlenen sıraya göre tüplere kan alınmalıdır.

Kan alımında kullanılan koagülasyon tüpünün üzerinde bulunan seviye çizgisine kadar kan alınmalıdır.

Fazla ya da az alınan kan hatalı sonuçlara yol açar.

Kan tüpe alındıktan sonra 3-4 kez alt üst edilmelidir. Çok fazla karıştırma işlemi hemolize yol açar.

Hastaya heparin verilen hattan kan alınmamalıdır. Bu hatalı yüksek sonuçlara yol açar. Eğer heparin verilen hattan kan alınmak zorunda kalınıyorsa hasta damar yoluna 5 ml salin solüsyonu verilmeli bundan sonra alınan kanın ilk 5 ml'si atılmalı, daha sonrasında koagülasyon tüpüne kan alınmalıdır.

6. İDRAR ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

6.1. TAM İDRAR TETKİKİ

- ✓ Rutin idrar incelemesi için sıklıkla sabah alınan ilk idrar örneği tercih edilmektedir. Mesanede beklemiş olan bu idrar örneği konsantre olduğundan, protein ve silindirlerin analizi için idealdir. Bunun söz konusu olmadığı durumlarda mesanede en az dört saat beklemiş örnekler kullanılabilir.
- ✓ İdrar temiz ve kuru bir plastik kaba alınmalıdır.
- ✓ Adet kanaması ya da vajinal akıntı varlığında, rutin idrar incelemesi yapılacaksa, idrar kültürü için alınan orta akım idrar örneği tercih edilmeli ve hastaya nasıl toplayacağı tanımlanmalıdır.
- ✓ İdrar örneği en kısa zamanda, 30 dakika içinde Laboratuvara ulaştırılmalı ve çalışılmalıdır. Oda ısısında bekleyen idrar örneğinde hücre sayısı ve içerik yönünden önemli değişiklikler meydana gelmektedir.

6.2. 24 SAATLİK İDRAR ÖRNEĞİNİN TOPLANMASI

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

- ✓ 24 saatlik idrarın tam ve doğru olarak toplanmış olması ve tamamlandıktan sonra derhal çalışılacak Laboratuvara teslim edilmesi sonuçların güvenilirliğini etkilediğinden aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.
- ✓ 24 saatlik idrarın toplanmaya başlanacağı sabah uyandıktan sonra ilk idrar tuvalete boşaltılır ve bu saat not edilir (örneğin sabah saat 08.00)
- ✓ Bu andan itibaren 24 saatlik tüm idrar gündüz ve gece boyunca dikkatlice temiz ve kuru bir kapta biriktirilir.
- ✓ Ertesi sabahki idrar da (örneğin ertesi sabah saat 08.00'deki idrar) toplama kabına eklenerek, idrar toplama işlemi tamamlanır.
- ✓ İdrar toplanan kabın temiz olması çok önemlidir. 3-5 litrelik temiz ve kuru bir kap temin edilir. Su için kullanılan pet şişeler en uygundur. Kola, deterjan gibi maddelerin konmuş olduğu kaplar kesinlikle uygun değildir.
- ✓ Örneğin bitirme süresince evin en serin yerinde, kesinlikle ışık almayan karanlık bir ortamda saklanması gerekmektedir. Her idrar ilavesinde tüm idrar karıştırılır.
- ✓ Birinci idrar toplama kabı dolarsa, başka idrar toplama kabına geçildiğinde bir önceki kapta bulunan idrarın yaklaşık yarısı da bu kaptakiyle karıştırılır.
- ✓ İdrar toplama kabı siyah, ışık geçirmeyen bir poşet içinde bekletmeden laboratuvara getirilir. Bazı analizler için 24 saatlik idrar örneklerinin özel koruyucu maddeler üzerine toplanması gerekmektedir (Örneğin 10 mL konsantre (6 mol/L) hidroklorik asid (HCl) üzerine).
- ✓ 24 saatlik idrarda yapılacak özel testler için herhangi bir yiyecek ya da içecek kısıtlaması olup olmadığı örneğin toplanmasından önce hastaya kesinlikle belirtilmelidir.

İDRAR KORUYUCULARI:

6N HCL: 10 mL, Asetik Asit % 50: 10 mL, Borik Asit Kristali: 5 gr +*: Tercih edilen yöntem

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

TEST ADI	ODA ISISI	BUZDOLABI	DONMU Ş	6N HCI	ASETİK ASİT%50	BORİK ASİT	TRANSPOR T
Aldosteron	+	+	+	-	-	+	Soğuk
Amino Asitler	-	+	+	-	-	-	Soğuk
Aminolevunilik Asit	-	+	-	+	+	-	Soğuk
Arsenik	+	+	+	+	+	+	Soğuk
Bakır	+	+	+	+	+	+	Soğuk
Civa	+	+	+	+	+	+	Soğuk
Çinko	+	+	+	+	+	+	Soğuk
5-Hidroksiindol Asetik Asit	-	+	-	+	+	-	Soğuk
Homovanilik asit	-	+	-	+	+	-	Soğuk
İyot	+	+	-	-	-	-	Soğuk
Kadmiyum	+	+	+	+	+	+	Soğuk
Kalsiyum	+	+	+	+	+	+	Soğuk
Katekolaminler (Epinefrin.No repinefrein,D opamin, Metanefrin, Normetanefrin)	-	+	-	+	+	-	Soğuk
17-Ketosteroidler	-	+	+	-	+	-	Soğuk
Kortizol	-	+	+	-	+	+	Soğuk
Kurşun	+	+	+	+	+	+	Soğuk

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Mikroalbümin	+	+	+	-	-	-	Soğuk
Oksalat	-	+	+	+	+	+	Soğuk
Porfirinler	-	+	-	-	-	-	Soğuk
Pridinolin	-	-	+	+	+	+	Donmuş
Sistin	-	+	+	-	-	-	Soğuk
Ürik asit	-	+	+	-	-	+	Oda Isısı
Vanilmandelik Asit	-	+	-	+	+	-	Soğuk

7. ALAB LABORATUVARI NUMUNE RED KRİTERLERİ

- ✓ Hasta adı ve soyadının bulunmadığı (barkodu olmayan), örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda örnek kabulü yapılmaz. (Sistem arızası olduğunda (barkod basılamadığında), servis sorumlusunun Laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil testler çalışılır.)
- ✓ Uygun tüplere alınmayan örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Aşırı Hemolizli örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Lipemik örnekler geldiğinde HBYS'nin açıklama kısmında belirtilir.
- ✓ Barkod tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa, altında isim olup olmadığı kontrol edilir ve yeni barkod basarak kabul yapılır.
- ✓ Tüp içindeki örnek miktarı yeterli değilse örnek kabul edilmez.
- ✓ Antikoagülanlı tüplerde pıhtılı örnekler kabul edilmez.
- ✓ Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.
- ✓ Özellikle ilaç düzeyi ve diürenal varyasyonu olan hormon analizlerinde, gereken bekleme süresine uyulmamışsa, örnek kabul edilmez.
- ✓ Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Kırık veya steril olmayan kaplar ile gönderilen örnekler kabul edilmez.
- ✓ Formalin içindeki örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Agar üzerine ekim yapılmış ve kurumuş örnekler
- ✓ Baryum, kimyasal boyalar ve yağlı kimyasal maddeler ile kontamine olan materyaller
- ✓ Foley kateter ucu (üretra florasını yansıtır)
- ✓ Kan kültürü hariç 1 günde, 2 den fazla alınan materyaller
- ✓ Birçok inceleme için tek eküvyon çubuğu ile gönderilmiş ise (örneğin; aerob, anaerob, fungus ve tbc için tek örnek gibi)

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

- ✓ Steril şartlarda olmayan, uygun alınmamış, dışına sızma olmuş veya herhangi bir şekilde kontamine olmuş örnekler
- ✓ Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi) reddedilir.
- ✓ Flora ile kontaminasyon olasılığından dolayı hatalı veri sağlama ihtimali bulunan örnekler reddedilir.
- ✓ Mantar ve mikobakteri incelemesi dahil 24 saat süre ile toplanan balgam ve idrar örnekleri laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Balgamın makroskopik olarak değerlendirilmesinde tükürük görünümünde olması
- ✓ Boyama için gönderilen materyallerin taşıma besi yerinde gönderilmesi durumlarında örnek reddedilir.

Yukarıda belirtilen maddelerin bulunması halinde hasta örneği **reddedilir**, ilgili bölüm bilgilendirilir ve yeni örnek isteği yapılır. Bu durum otomasyon sistemi üzerinden tetkik istemini yapan bölüme bildirilir. Reddedilen numune laboratuvarında saklanır.

8. SONUÇ RAPORLANMASI VE RAPORLAMA SÜRELERİ

Test sonuçları onaylandığı zaman www.alab.com.tr adresinde kurumsal test sorgu bölümünde bireysel hastalar için bireysel test sorgu bölümünden görülebilir. Kurumlar kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre ile bireysel hastalar kayıt sırasında kendilerine verilen barkod numarası ve soyadları ile sonuçlarını öğrenebilir. Ayrıca bireysel hastalarımız talep ederler ise mail adreslerine sonuçlar gönderilebilir. Test sonuçlarının yazıcı çıktıları da kurum ve ya hastanın kendi talebi ile kurumumuz tarafından elden teslim edilebilir.

Testlerin Sonuçlanma Süreleri

Laboratuvar test kataloğunda her bir testin çalışma süreleri ve rapor tarihleri bulunmaktadır. Ayrıca sistemimize dahil kurumlar hastaların kayıtları yapıldıktan sonra sistemde muhtemel rapor tarihini görebilmektedir.

9. LABORATUVARA GELEN NUMUNELERİN SAKLANMASI VE İLAVE İSTEMLER

Laboratuvarın çalışma prensibi olarak, laboratuvarımıza gelen ve kaydı yapıp çalışılan numuneler, ileri tetkikler veya test tekrarları için serumlar; buzdolabında/derin dondurucuda 2 hafta, tam kan örnekleri; buzdolabında 1gün boyunca saklanır. Eğer testler çalışma gününden önce geldi ise, çalışma

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

gününe kadar da aynı şekilde saklanır. Daha ileri süreli saklamaya ihtiyaç duyulursa -20°C de veya -70°C de saklanır.

Şayet ilave bir analiz talebiniz olursa lütfen laboratuvar ile iletişime geçin, **03123229999**. İlave numune ihtiyacı olursa bu tarafınıza bildirilecektir.

10. ÇALIŞILAN TESTLER

RIA	Radioimmunoassay
ECLIA	Enzyme-linked chemiluminescent Immunosorbent Assay
EIA	Enzyme Immunoassay
HPLC	High Performance Liquid Chromatography
LC-MS MS	Liquid Chromatography - Mass Spectrometry
IFA	Immunofluorescent Antibody Assay
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
FIA	Fluorescent Immunoassay
ELFA	Enzyme - Linked Fluorescent Assay
PCR	Polymerase Chain Reaction
IHA	Indirect Hemagglutination
GC-MS	Gas Chromatography Mass Spectrometry
RT-PCR	Real Time Polymerase Chain Reaction
PCR-SSP	Polymerase Chain Reaction Single Specific Primer
RID	Radialimmunodiffusion
ISE	Ion Selective Electrode
AAS	Atomic Absorption Spectrometry
PEG	Polyethylene Glycol
FPIA	Fluorescent Polarisation Immunoassay

Test Adı	Numune Türü ve Miktarı		Metot	Çalışma Günleri	Rapor Tarihi
≠ 1,25 Dihidroksi Vitamin D	Serum	1 mL	CLIA	Salı saat 09:00 (Pazartesi 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra Saat 12:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

#Androstenedion	Serum	1 mL	CLIA	Salı, Perşembe ve Cumartesi saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört iş günü içinde
#1- Hidroksipiren	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
#11-Deoksikortizol	Serum	1 mL	RIA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört iş günü içinde
17 OH-Progesteron	Serum	1 mL	ELISA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört iş günü içinde
17-Hidroksikortikoidler (17- Ketosteroidler) #	İdrar (Spot, 24 saat)	2,5 mL	LC-MS-MS	Çarşamba saat:12.00 (Salı saat 18.00'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 12:00
# 2,5 Hekzandion	İdrar (Spot)	5 mL	GC-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

25 OH Vitamin D	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* 5-Hidroksi Indol Asetik Asit (5-HIAA)	İdrar (Spot, 24 saat)	2,5 mL	LC-MS-MS	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 12: 00
*5'- Nükleotidaz	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 12: 00
* ACE (Angiotensin Converting Enzyme)	Serum, Heparinli Plasma veya BOS	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 12: 00
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)	EDTA'lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.)	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Açıkarnitin Analizi (Tandem MS)	Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (en az 1 daire)		LC-MS-MS	Pazartesi, Cuma (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 12: 00
* Adacık Hücre Antikoru (Islet cell antikoruICA)	Serum	1 mL	CLİA	Salı, Perşembe saat 13:00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler)	7 iş günü içinde

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır	
* Adenovirus IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı saat:12.00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Adenovirus IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı saat:12.00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Adenovirüs Antijeni	Gaita	5 g	İmmun kromotografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)	Serum, Plevra, BOS	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin)	EDTA'lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.)	1 mL	RIA	Çarşamba(Salı günü saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	4 gün sonra saat 10:00
* Adrenalin (Epinefrin)	İdrar(24 Saatlik veya Spot) 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır	5 mL	LC-MS/MS	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 18:00
* Adrenalin (Epinefrin)	EDTA Plazma	1 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir	Bir hafta sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonraki çalışmaya kalır)	
Aktive Parsiyel Tromboplastin zamanı (aPTT)	Sitratlı plazma	1 mL	Koagülo metrik	Hafta içi her gün(Saat 15.00 'dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı)	Sitratlı plazma	1 mL	Koagülo metrik	Pazartesi, Perşembe	İki gün sonra saat 18:00
* ALA (Aminolevulinik asit)	24 saatlik idrar	5 mL	EIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
Alanin Aminotransferaz (ALT)	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Albumin	Serum, BOS	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Aldolaz	Serum	1 mL	Fotometrik	Pazartesi (Saat 10:00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Ertesi gün saat 10:00
*Aldosteron	Serum veya İdrar (Numune alındıktan sonra soğuk ortamda gönderilmelidir.)	1 mL 5 mL	RIA	Salı, Perşembe, Cumartesi (Saat 10:00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	6 iş günü içinde

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Alerji Beslenme (Türkiye) Paneli	Serum	1 mL	EIA	Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Cumartesi günü saat 10:00
* Alerji Çocuk (Türkiye) Paneli	Serum	1 mL	EIA	Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Cumartesi günü saat 10:00
* Alerji Solunum(Türkiye) Paneli	Serum	1 mL	EIA	Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Cumartesi günü saat 10:00
* Alfa-1 Antitripsin	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 10:00
Alfa-Fetoprotein (AFP)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Alkalen Fosfataz (ALP)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Alkalen fosfataz izoenzimleri	Serum	1 mL	Elektroforez	laboratuvara danışınız	
* Alkalen Fosfataz (Kemiğe Spesifik)	Serum	1 mL	Fotometrik	Pazartesi (Saat 10:00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Ertesi gün saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Alüminyum	Heparinli lacivert kapaklı tüp veya İdrar (Spot veya 24 saatlik)	1 mL 5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
Amilaz	Serum veya İdrar	1 mL 5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Amiloid A	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 10:00
* Amino Asitler	EDTA'lı plazma-Serum, BOS veya İdrar	1 mL 5 mL	LC-MS-MS	Çarşamba-Cuma (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Amip Antijeni (Entamoeba H.)	Gaita	5 g	EiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Amip Antikoru (Entamoeba H.)	Serum	1 mL	ELİSA	Salı Saat 12.00 (Pazartesi'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 10:00
* Amonyak (NH3)	EDTA'lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. (Heparinli plazma kabul edilmemektedir.)	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* ANCA Tarama (c-ANCA ve p-ANCA)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Androstenedion	Serum (Kırmızı kapak tercih edilir)	1 mL	CLİA	Salı, Perşembe, Cumartesi (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	4 iş günü içinde
Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA	Serum	1 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 13:00 (çalışma günü saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 13:00 (çalışma günü saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 13:00 (çalışma günü saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Anti DNase-B	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Anti ds-DNA Tarama	Serum	1 mL	EİA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti düz kas antikor (ASMA)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Endomisyum antikor IgA	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Endomisyum antikor IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti Faktör Xa	<i>Sitratlı Plazma</i>	1 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti Gliadin IgA	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Gliadin IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				gelennmuneler bir sonraki çalışmaya kalır	
* Anti Hepatit E (HEV)	Serum	1 mL	EİA	Cuma saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelennmuneler bir sonraki çalışmaya kalır	İki gün sonra saat 10:00
* Anti Jo-1	Serum	1 mL	EİA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti Jo-1(Immunblot)	Serum	1 mL	İmmunblot	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profili (ANKA Tarama)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti Pariyetal Antikor (APA)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
*Anti Pariyetal Antikor (APA)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti Plazmin	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00	İki gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Anti Ribozomal P Protein	Serum	1 mL	İFA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti Sentromer	Serum	1 mL	İmmunblot	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti Sperm Antikor (ASA)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 hafta sonra Cumartesi
Antibiyotik duyarlılık testi	Genç bakteri suşu		Disk Difüzyon	Hafta içi hergün saat 15:00	İki gün sonra saat 10:00
* Anti-Fosfatidil Serin IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti-Fosfatidil Serin IgM	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti-Fosfolipid IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Anti-Fosfolipid IgM	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti-GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikorları)	Serum	1 mL	RİA	Salı ve Perşembe (Çalışma gününden en geç bir gün önce 10:00'a kadar numune laboratuvara ulaştırılmalı)	7 iş günü içinde
* Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)	Serum	1 mL	İFA	Cuma günü saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
Anti-HBc IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti-HBc Total (IgG)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti-HBe	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti-HBs	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Anti-HCV	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Anti-Histone	Serum	1 mL	İFA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Anti-İnsülin Antikoru	Serum	1 mL	RIA	Salı ve Perşembe (Çalışma gününden en geç bir gün önce 10:00'a kadar numune laboratuvara ulaştırılmalı)	7 iş günü içinde
≠ Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG)	Serum	1 mL	EiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM)	Serum	1 mL	EiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Mitokondrial Antikor (AMA)	Serum	1 mL	EiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA)M-2	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Antimon	Heparinli Tam Kan İdrar	1 mL 5mL	ICP-MS	Hafta içi her gün	15 gün sonra
Anti-müllerian Hormon (AMH)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Anti-Nükleer Antikor (ANA)	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi-Perşembe(Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün 13:00
* Anti-Nükleer Antikor (ANA)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti-Scl 70	Serum	1 mL	EİA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti-Scl 70	Serum	1 mL	İmmunblot	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Anti-Sm	Serum	1 mL	EİA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	
≠ Anti-Sm	Serum	1 mL	İmmunblot	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Anti-Sm/RNP	Serum	1 mL	EİA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Anti-Sm/RNP	Serum	1 mL	İmmunblot	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Tiroglobulin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Anti-TPO(Tiroid peroksidaz antikorları)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Antitrombin III Aktivite	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Apolipoprotein A	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Apolipoprotein B	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* APTT-LA	Sitratlı Plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.)	1 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Aquaporin-4 (Anti-NMO)	Serum, BOS	1 mL	İFA	Perşembe(Çalışma Gününden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Ertesi gün saat 18:00
* Araşidonik Asit (Tam Otomatik Cihazda Trombosit Agregasyonu)	Sitratlı Plazma	3 mL		Çarşamba(Çalışma Gününden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Ertesi gün saat 18:00
* ARB aranması	Balgam, bronşiyal lavaj, idrar	1 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
* Arsenik-Arsenik eritrosit içi	Heparinli Tam Kan - İdrar	3 mL 5 mL	ICP-MS	Hafta içi her gün	15 gün sonra
*ASCA IgA (Saccharomyces Cerevisiae Antikorları)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler)	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
* ASCA IgG (Saccharomyces Cerevisiae Antikorları)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Asetaldehid	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi her gün	15 gün sonra
* Asetaminofen (Parasetamol)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
* Asetilkolin Reseptör Antikor(ACRH)	Serum	1 mL	RIA	Pazartesi, Çarşamba(Çalışma gününden en geç bir gün önce 10:00'a kadar numune laboratuvara ulaştırılmalı)	7 iş günü içinde
* Asit fosfataz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
ASO (Antistreptolizin O)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Aspartat Aminotransferaz (AST)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Bakır (Eritrosit içi)	Heparinli Tam Kan	3 mL	AAS	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün Sonra
Bakır	İdrar, Serum(Lacivert kapaklı tüp tercih edilir)	5 mL 3 mL	AAS	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün Sonra
Bakteri tanımlama	Kültür		Yarı otomatik	Hafta içi hergün	2 gün sonra
* BAL lenfositlerinin immünofenotip tayini (CD45, CD14, CD3,CD4, CD8, CD19, CD3-16+C3956,CD15)	Bronko alveolar lavaj sıvısı (BAL)	3 mL	Flow cytometri	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18:00
Balgam Kültürü	Balgam (steril bir kaba konur)		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
* Baryum (Ba)	Serum(Lacivert kapaklı tüp tercih edilir)	3 mL	AAS	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün Sonra
* Bence Jones proteini	Spot İdrar-24 Saatlik İdrar	5 ml	Nefelometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Benzen	Spot İdrar-Tam kan	5 mL 1 mL	GC MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
* Berilyum	Tam Kan	1 mL	GC MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ Beta 2-mikroglobulin	Serum-İdrar	1 mL 5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün saat 18:00
Beta-hCG (Kantitatif)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Bikarbonat (HCO₃)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Bilirubin (direk)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Bilirubin (Total)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Biotinidaz Aktivitesi	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi Çarşamba(Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Bizmut (Bi)	Tam Kan	1 mL	AAS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
BNP (Brain natriüretic peptide)	EDTA'lı Plazma	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Boğaz Kültürü	Boğaz Sürüntüsü Oda Isısında		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
* Borrelia Burgdorferi Antikor IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Borrelia Burgdorferi Antikor IgM	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* BOS İmmunelektroforez	BOS ve Serum	1 mL	Elektroforez	Salı saat 13: (Saat 10.00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
BOS Kültürü	BOS	1 mL	Kültür	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Boyalı Mikroskopik inceleme	BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve sürüntü örnekleri		Mikroskopik	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
Boyasız direk Mikroskopik inceleme	BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve sürüntü örnekleri		Mikroskopik	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
* Böbrek taşı analizi	Taş		Kolorimetrik	Pazartesi saat 09:00 (Cumartesi saat 09:00'a kadar kabulü yapılan numuneler	8 gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				çalışmaya dahil edilir.)	
≠ Brucella aglütinasyon testi (2-merkapt etanol ile)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Brucella aglütinasyon testi (Coombs anti serumu ile) (Wright)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Brucella IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
≠ Brucella IgM	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Burun Akıntısı Kültürü	Serum		Kültür	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
Büyüme Hormonu (Growth hormon, sTH)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* C1 Esteraz Inhibitörü	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* C1 Esterase Inhibitor activity (Fonksiyonel)	Sitratlı plazma	1 mL	Nefelometrik	Pazartesi günleri çalışılır. (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün sonra
C3 (Kompleman 3)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
C4 (Kompleman 4)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
CA 125 (Kanser antijen 125)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CA 15-3 (Kanser antijen 15-3)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CA 19-9 (Karbonhidrat antijen 19-9)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

CA 72-4 (Kanser antijen 72-4)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* c-ANCA (PR3 ANCA)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Candida Albicans Aranması			Kültür	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* CD34 Analizi (CD45, CD14, CD34 sonuçları ile beraber verilir)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	Flow cytometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* CD4/CD8 Analizi (CD4, CD8, CD14,CD45 sonuçları ile beraber verilir)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	Flow cytometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* CH 50 Kompleman Aktivitesi	Serum	1 mL	EİA	Cuma saat 13:00 (Saat 10.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Chlamydia Antijeni	Sürüntü Servikal , Ön idrar		EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
* Chlamydia Pneumoniae IgG	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Chlamydia Pneumoniae IgM	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Chlamydia Trachomatis IgG	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Chlamydia Trachomatis IgM	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Chlamydia Trachomatis PCR	İdrar, Swap		PCR	Salı Saat 12.00 (Pazartesi gününe kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	İki gün sonra saat 18:00
* Civa, Eritrosit içi	EDTA'lı Tam Kan	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	15 Gün Sonra
* Civa	EDTA'lı Tam Kan, İdrar	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	15 Gün Sonra
CK (Total Kreatin Kinaz)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* CK İzoenzim Elektroforezi	Serum	1 mL	Elektroforez	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	1 ay sonra saat 18:00
CK-MB	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
* CK-MB (mass ölçümü)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Clostridium Difficile Toksin A	Gaita	5 g	Immunokro motografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Clostridium Difficile Toksin B	Gaita	5 g	Immunokro motografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
CMV IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* CMV IgG Avidité Testi	Serum	1 mL	ELFA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* CMV PCR	EDTA'lı Plazma (tercih edilir), Serum, BOS,	1 mL	PCR	Perşembe Saat 12.00 (Çarşamba gününe kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	İki gün sonra saat 18:00
CMV IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
C-Peptid	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CRP (C Reaktif Protein)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
* Cryptosporidium antijen	Gaita	5 g	Immunokro motografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Ctx (Beta Cross)	EDTA'lı Plazma	1 mL	ECLİA	Pazartesi saat 12:00 (Cumartesi günü sonrasında gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 18:00
Çinko	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Çinko (eritrosit içi)	EDTA'lı plazma	2 mL	AAS	Hafta içi hergün	15 Gün Sonra
Çinko	İdrar	5 mL	AAS	Hafta içi hergün	15 Gün Sonra
* Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)	EDTA'lı plazma	1 mL	GC-MS	Cumartesi saat 15:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün Sonra
D-Dimer	Sitratlı plazma	1 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
* Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni)	Serum	1 mL	EİA	Çarşamba (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru)	Serum	1 mL	EİA	Çarşamba (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Demir	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
Demir Bağlama Kapasitesi	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
* Deoksipiridinolin	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	HPLC	Çarşamba (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler)	Cumartesi saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
Deri lezyon Kültürü	Lezyon		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Desmoglein-1 abs	Serum	1 mL	IFT	Hafta içi hergün	1 ay sonra
≠ Desmoglein-3 abs	Serum	1 mL	IFT	Hafta içi hergün	1 ay sonra
≠ DHEA (Dehidroepiandrosteron)	Serum	1 mL	ELİSA	Cuma (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	4 gün sonra
DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Diamin Oksidaz (DAO)	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi	Aynı gün saat 18:00
≠ Digoksin	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
≠ Dihidrotestosteron (DHT)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	14 gün sonra
Direkt Coombs	EDTA'lı plazma	1 mL	Jel Filtrasyon	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler	İki gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
Doku transglutaminaz Ig A	Serum	1 mL	ELİSA	Salı- Perşembe 12:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün 18:00
Doku transglutaminaz Ig G	Serum	1 mL	ELİSA	Salı- Perşembe 12:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün 18:00
* Dopamin, İdrar	İdrar (Spot, 24 Saatlik) _ 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.	5 mL	LC-MS/ MS	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 10:00
* Dopamin, Plazma	EDTA Plazma	1 mL	HPLC	Hafta içi hergün (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra
Dörtlü Tarama Testi	Serum	3 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Üç iş günü sonra 18:00
* EBV EA IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* EBV EA IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ EBV EBNA IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra 18:00
≠ EBV EBNA IgM	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç iş günü sonra 18:00
≠ EBV VCA IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı-Cuma saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ EBV VCA IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı-Cuma saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ EBV PCR	EDTA'lı plazma	1 mL	PCR	Çarşamba Saat 12.00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç iş günü sonra 18:00
≠ Echinococcus Granulosus IgG	Serum	1 mL	İFA	15 günde bir Pazartesi günü çalışılır	İki gün sonra saat 10:00
≠ ENA tarama	Serum	1 mL	EİA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, perşembe günü çalışılacak	İki gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				örnekler için Çarşamba 12:00)	
* ENA Tarama (12'li Panel) RNP/SM, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) ds-DNA, sentromer, nücleosom, ribozomal P protein, histone, PCNA	Serum	1 mL	İmmunoblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	İki gün sonra saat 10:00
* ENA Tarama (6'lı Panel) (RNP/SM, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1)	Serum	1 mL	İmmunoblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	İki gün sonra saat 10:00
* ENA Tarama (17'li Panel) RNP/SM, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, ds-DNA, sentromer, nücleosom, ribozomal P protein, histone, PCNA, PM-Scl, Mi-2, Ku, U1-snRNP,	Serum	1 mL	İmmunoblot	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	İki gün sonra saat 10:00
Eozinofil (Total)	EDTA'lı plazma	3 ml	Cell Counter + Mikroskopik	Hafta içi her gün(Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Eozinofil Katyonik Protein (ECP)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler	Ertesi Gün Saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Eritropoetin (EPO)	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
Estradiol (E2)	Serum	1 mL	ECLiA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Estriol (E3)	Serum	1 mL	ECLiA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Everolimus	EDTA'lı Tam Kan	5 mL	LC-MS/ MS	Salı, Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör II (Protrombin)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör IX (Christmas)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Faktör IX İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Faktör V (Proakselerin	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Faktör VII (Prokonvertin)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Faktör VIII	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Faktör VIII İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Faktör X (stuart Faktör)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Faktör XI	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Faktör XII (Hageman Faktörü)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Faktör XIII	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Fekal Kalprotektin	Gaita	5 g	İmmuno kromotografik	Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
* Fenilalanin	Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire		LC-MS-MS	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Fenilglisiklik Asit	İdrar	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün	15 Gün sonra
* Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler)	Ertesi Gün Saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Fenobarbital	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
* Fenol	İdrar	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün	15 Gün sonra
Ferritin	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Fibrinojen	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Fitnik asit	EDTA'lı plazma	3 mL	CMIA	Çarşamba Saat 12.00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	15 Gün sonra
Folik Asit	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Folik Asit, Eritrosit içi	EDTA'lı tam kan	3 mL	CMIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
* Formaldehit	İdrar	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün	15 Gün sonra

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Formik Asit	İdrar	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün	15 Gün sonra
Fosfor	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
Fosfor (İdrar)	İdrar(Spot-24 Saat)	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
Fronkül kültürü	Sürüntü		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
* Fruktozamin	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
FSH (Folikül stimülan Hormon)	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
FT3 (serbest Triiyodotironin)	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
FT4 (serbest Tiroksin)	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonraki çalışmaya kalır)	
* FTA-ABS IgG FTA-ABS IgM	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün	15 Gün sonra
* Gabapentin	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Gaita Kültürü	Gaita (Örnek alındıktan hemen sonra Carry - blair transport besiyeri içine alınmalı ve gönderilmelidir.)		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
* Gaita steatokrit	Gaita		Mikroskobik	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
Gaitada Amip	Gaitada (Numune 30dk. içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.)		Mikroskobik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
Gaitada Gizli Kan	Gaita		İmmuno kromotografik	Hafta içi her gün	Ertesi gün saat 10.00
* Gaitada Hazım	Gaita		Mikroskobik	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 10:00
Gaitada Parazit	Gaita		Mikroskobik	Hafta içi hergün	Ertesi gün saat 10.00
Gaitada PH	Gaita		Kolorimetrik	Hafta içi hergün	Ertesi gün saat 10.00
* Gaitada Sterkobilin Aranması	Gaita		Mikroskobik	Hafta içi hergün	İki gün sonra Saat: 18:00
* Gaitada Şeker Kromotografisi	Gaita	5 g	RİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00' dan sonra	Yedi iş günü içinde

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Galaktomannan Antijeni	Serum	1 mL	EİA	Çarşamba (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Gangliosit Antikorları (GM1,GM2,GM3, GD1a,GD1a,GT1a,GQ 1B)	Serum	1 mL	İmmunblot	Hafta içi hergün	15 Gün sonra
≠ Gardnerella Vaginalis PCR	Vücut sıvıları		PCR	Salı saat 12.00 (Pazartesi saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra Saat: 18:00
≠ Gastrin	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
GGT (Gama Glutamil Transferaz)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Giardia Antijeni	Gaita		İmmuno kromotografik	Hafta içi her gün	İki gün sonra Saat: 18:00
≠ Glikojen depo hastalıkları, Karaciğer profili	EDTA'lı tam kan	3 mL	laboratuvara danışınız	laboratuvara danışınız	
≠ Gıda İntolerans Testi	laboratuvara danışınız		laboratuvara danışınız	laboratuvara danışınız	

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Glukoz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Glukoz (İdrar)	İdrar (Spot)	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz(G6PD)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 10:00
Glukoz Tolerans testi	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Gonokok Kültürü			Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
Göz (Konjonktiva) Kültürü	Göz sürüntüsü		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
Gruber-Widal (Salmonella Tüp Aglütinasyonu)	Serum	1 mL	Lateks	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Haptogloblin	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

HAV IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HAV IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HBeAg	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HBsAg	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HDL Kolesterol	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Hegzadion (2,5) Total ve Serbest	İdrar (Spot)	5 mL	AAS	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
* Heinz-Body Aranması	Tam Kan	1 ml		Laboratuvara Danışın	
Helicobacter pylori direkt antijen	Gaita	5 g	İmmuno kromotoğrafik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
Helicobacter pylori Ig A	Serum	1 mL	ELİSA	Salı-Perşembe (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Helicobacter pylori Ig G	Serum	1 mL	ELİSA	Salı-Perşembe (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Hemoglobin A1C (HbA1c)	EDTA'lı plazma	3 ml	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Hemoglobin elektroforezi	EDTA'lı plazma	3 ml	HPLC	Pazartesi-Perşembe (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
Hemogram (Tam Kan sayımı)	EDTA'lı plazma	3 ml	Cell Counter	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HIV 1 / HIV 2 Antikor	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Hidroksipirolin (serum)	İdrar	5 ml	LC-MS-MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
≠ High Sensitif CRP	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat	Ertesi gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Hippürik asit	İdrar (Spot)	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün	15 gün sonra
HOMA-IR (İnsülin Direnci)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Homosistein	EDTA'lı plazma	3 ml	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Homovanilik asit (HVA)	İdrar, 24 saatlik İdrar (Asetik asit veya 6N HCl üzerine İdrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır)	5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
* HSV Tip 1 IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 10:00
* HSV Tip 1 IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 10:00
* HSV Tip 2 IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ HSV Tip 2 IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 12:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 10:00
Ig A	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Ig D	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Total Ig E	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Ig G	Serum, BOS	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ IgG alt sınıfları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ IgG İndeksi	Serum ve BOS birlikte gönderilmesi gerekir	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün	10 gün sonra
Ig M	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Interleukin 6	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ İntrinsik Faktör Antikoru (IF)	Serum	1 mL	EiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	7 gün sonra
İdrar kültürü ve koloni sayımı	İdrar (Spot)	5 mL	Kültür	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
İdrar tahlili	İdrar (Spot)	5 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ İdrar Total Glukozaminoglikan (GAG)	İdrar (Spot)	5 mL	Fotometrik	Perşembe saat 13:00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	7 gün sonra
İkili Tarama Testi (Birinci Trimester, Down sendromu) (PAPP-A + free beta HCG)	Serum	1 mL	ECLiA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* İmmünelektroforezi (idrar)	24 Saatlik idrar	10 mL	Elektroforez	Pazartesi - Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* İmmünelektroforezi (serum)	Serum	1 mL	Elektroforez	Pazartesi - Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* İndirek Coombs	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* İnhibin A	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
İnsülin	Serum	1 mL	ECLiA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* İnsülin Like Growth Faktör Bağlayan Protein-3 (IGF BP3)	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
İyonize Kalsiyum (Ca²⁺)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* İyot	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
* Kabakulak (mumps) IgG	Serum	1 mL	EİA	Perşembe (Çarşamba gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
* Kabakulak (mumps) IgM	Serum	1 mL	EİA	Perşembe (Çarşamba gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
* Kadmiyum	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
* Kadmiyum(Eritrosit İçi)	Heparinli Tam Kan	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
* Kalay	Serum, İdrar	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	15 gün sonra
* Kalsitonin	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Kalsiyum	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Kalsiyum (İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
* Kan Grubu	EDTA'lı plazma	3 mL	Tüp aglütinasyon	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Ertesi Gün Saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Kan Kültürü	Kan	5 mL	Kültür	Hafta içi hergün	Üremeye göre yedi gün içerisinde saat 18:00
Kan üre azotu (BUN)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Kanda Alkol (Etanol)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Kappa Hafif Zincir (Total, İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Kappa Hafif Zincir (Total, Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Kappa Hafif Zincir (Serbest,İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Kappa Hafif Zincir (Serbest,Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
Karbamazepin	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Karnitin/Açilkarnitin Analizi(Tandem MS)	Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire		LC-MS/MS	Pazartesi-Cuma (saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
* Kızamık (Rubeola) IgG	Serum	1 mL	CLIA	Perşembe 12:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Kızamık (Rubeola) IgM	Serum	1 mL	CLIA	Perşembe 12:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Kist Hidatik (İndirekt hemaglutinasyon)	Serum	1 mL	IHA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Klinik Örnekte MRSA (Staphylococcus aureus) aranması	Klinik Örnek		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre on gün içerisinde
Klorür	Serum	1 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonraki çalışmaya kalır)	
Klorür (İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	İSE	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Kobalt (Co)	Serum (Lacivert kapaklı tüp)	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün Sonra
Kolesterol	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Konjktiva Kültürü			Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
Kortizol	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Kortizol, İdrar-Tükürük	Spot İdrar, 24 Saatlik İdrar (Borik Asit ile beraber gönderilmesi tavsiye edilir.) Tükürük	2 mL 1 mL	LC-MS/MS	Çarşamba (Salı gününe kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	Cumartesi Saat: 10:00
Kreatinin	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Kreatinin klerens testi	24 saatlik İdrar (soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.) Serum aynı anda gönderilmeli.	5 mL 2 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Kriyofibrinojen	EDTA'lı plazma	3 mL	Presipitasyon	Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe	Dört iş günü içinde saat 18:00
Kriyoglobulin	laboratuvara danışınız				
≠ Krom	Tam Kan İdrar (Spot, 24 Saatlik)	2 mL 5mL	AAS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün Sonra
≠ Kromogranin A	Serum	1 mL	EİA	Çarşamba (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat:10:00
Kulak Akıntı Kültürü	Kulak Akıntısı		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Kurşun	Tam Kan İdrar (Spot, 24 Saatlik)	2 mL 5mL	AAS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün Sonra
≠ Laktat (Laktik Asit)	Oxalatlı plazma Not: Numune sodyum florid / potasyum oksalatlı gri kapalı tüpe alındıktan hemen sonra plazma hemoliz: edilmeden hemen ayrılmalıdır	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Laktat Dehidrogenaz (LDH)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Laktoz Tolerans Testi	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lambda Hafif Zincir (Total, İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lambda Hafif Zincir (Total,Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lambda Hafif Zincir (Serbest,İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lambda Hafif Zincir (Serbest,Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lamotrigine	Serum	1 mL	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Pazartesi ve Çarşamba günlerinden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 18.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

LDL Kolesterol	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Legionella Antijeni (İdrar)	İdrar	5 mL	Elisa	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18.00
* Legionella Pneumophila 1 IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18.00
* Legionella Pneumophila 1 IgM	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18.00
* Lenfoma (Lösemi) İmmünofenotip Analizi (21 adet monoklonal antikor sonucu verilir)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow cytometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Lenfosit Alt Grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow cytometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Levetracetam	Serum	1 mL	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Pazartesi ve Çarşamba günlerinden sonra gelen numuneler)	Üç gün sonra saat 18.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır.)	
≠ LDL alt grupları (Lipoprint)	Serum veya EDTA plasma Sadece açlık (12 saat) örnekleri kullanılmalıdır. Antikoagülan olarak Heparin kullanılmamalıdır	3 mL	Elektroforez	laboratuvara danışınız	
LH (Luteinizan Hormon)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Aynı gün saat: 18:00
Lipaz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Lipoprotein a	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Lipoprotein Elektroforezi	Serum	3 mL	Elektroforez	laboratuvara danışınız	
Lityum	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM)Antikorları)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18.00
≠ Liver Profil (SLA, M2, LKM1, LC1)	Serum	1 mL	İFA	Perşembe saat 10:00 (Çarşambadan sonra gelen numuneler bir	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonraki çalışmaya kalır)	
* Lupus Antikoagülan (Doğrulama)	Sitrat'lı Plazma Sitratlı tüpe kan alındıktan sonra santrifüj edilmeli ve plazma kısmı ayrılıp dondurulmalıdır.	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Lupus Antikoagülan (Tarama)	Sitrat'lı Plazma Sitratlı tüpe kan alındıktan sonra santrifüj edilmeli ve plazma kısmı ayrılıp dondurulmalıdır.	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Magnezyum	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Magnezyum, Eritrosit içi	Heparinli Tam Kan	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Makroprolaktin Taraması	Serum	1 mL	PEG çöktürme ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Malaria (Sıtma) Pf/PAN Ag	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Mandelik asit	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	On beş gün sonra

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Mangan (Ma)	Tam Kan	3 mL	AAS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
Mantar Aranması Ve Kültür	Kültür örneği		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre üç gün içerisinde saat 18:00
Meni (Semen, Sperm, Ejakulat) Kültürü	Semen, Sperm, Ejakulat	3 mL	Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre üç gün içerisinde saat 18:00
≠ Metanefrin	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.	5 mL	LC-MS/MS	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Metanefrin	EDTA'lı Plazma	3 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Methanol (Metil alkol)	İdrar (Spot)	5 mL	GC-MS	Hafta içi hergün	7 gün sonra saat 18:00
≠ Methemoglobin	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler	Üç gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Methotrexate	Serum	1 mL	Tandem-CMIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Metiletilketon	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
≠ Metil Hippürik Asit	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
≠ Metil malonik asit	Serum İdrar (Spot-24 saat)	1 mL 5 mL	LC-MS/MS	Çarşamba 13:00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	7 gün sonra saat 18:00
Mikobakteri Kültürü	Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında		Kültür	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üreme yoksa 56 gün
Mikoplazma Hominis Kültürü	Sürüntü		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Mikoplazma Pneumoniae IgG	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler	Üç gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Mikoplazma Pneumoniae IgM	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Mikroalbumin	İdrar (Spot-24 saat)	5 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Miyogloblin	Serum İdrar (Spot-24 saat)	1 mL 5 mL	CMİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Molibden (Mo)	Lacivert Kapaklı Tüp	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
* Mono Test (Heterofil Antikor)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Monoklonal Antikorlar (CD Markerları)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow cytometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Mukopolisakkarit Tayini	İdrar (Spot)	5 mL	EİA	Perşembe (Çarşamba gününden sonra gelen numuneler	7 gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
Nazal Smear	Sürüntü		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
NCOV-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
NCOV-19 IgM (Kantitatif)	Serum	1 mL	ELİSA	Çarşamba, Cuma (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
NCOV-19 (Corona Virüs Tayini PCR)	Özel besiyeri		PCR	Hafta içi hergün(Saat 17:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Nikel	Serum İdrar (Spot-24 saat)	1 mL 5 mL	AAS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
≠ Noradrenalin (Norepinefrin),İdrar	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.	5 mL	LC-MS/MS	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18:00
≠ Noradrenalin (Norepinefrin),	EDTA'lı Plazma	2 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	7 gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Normetanefrin, İdrar	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.	5 mL	LC-MS/MS	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18:00
* Normetanefrin, Plazma	EDTA'lı Plazma	2 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	7 gün sonra saat 18:00
* Nöron spesifik enolaz (NSE)	Serum (Plazma kabul edilmemektedir) Kan 1 saat içerisinde santrifüj edilmelidir	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Nükleer Matriks Protein (NMP 22)	İdrar Laboratuvardan koruyuculu özel idrar toplama kabı isteyin. İdrarın alınması ve özel kabına konması 30 dk.'yı geçmemelidir	5 mL	Strip	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
OGTT(100gr) 60-120-180 Dk.*	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
OGTT(50gr) 60dk.*	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* O-Krizol	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ Oksalat	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 Saatlik İdrarı 30 mL 6 N HCl üzerine toplayın. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir	5 mL	Fotometrik	Pazartesi saat 12:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Oksiyur Yumurtası Araştırılması	laboratuvara danışınız				
≠ Oraklaşma testi	EDTA'lı tam kan	3 mL	Mikroskopik	Pazartesi - Perşembe saat 12:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Organik Asit Analizi (İdrarda)	İdrar (Spot)	10 mL	GC-MS	Pazartesi, Cuma (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi gün sonra saat 18:00
≠ Osteokalsin	Serum	1 mL	ECLİA	Pazartesi, (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Oxcarbazepin ve aktif metabolitleri(Trileptal)	Serum	1 mL	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 12:00 (Pazartesi ve Çarşamba günlerinden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 18:00
Ozmalarite (İdrar)	İdrar	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Ozmalarite (Serum)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
* Ozmatik Frajlite	EDTA'lı tam kan	3 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
* P1NP	Serum	1 mL	ECLİA	Pazartesi saat 12:00 (saat:10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 18:00
* p-ANCA (Anti-MPO)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
* Pankreatik amilaz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Paraoksonaz (PON)	EDTA'lı plazma	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Parvovirus B19 IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler)	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Parvovirus B19 IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Periferik Yayma İncelemesi	EDTA'lı tam kan	3 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Pıhtılaşma Zamanı	Sitratlı Plazma Numune vermek için hasta laboratuvara gelmelidir.	1 mL		Hafta içi hergün	Aynı gün saat 18:00
* Piridinolin	İdrar (Spot- 24 Saatlik)	5 mL	HPLC	Çarşamba saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
* Piruvat	EDTA'lı Tam Kan, BOS Kan alındıktan hemen sonra 1 mL TamKan, 2 mL %8 perklorik asit içeren tüpe konur, karıştırılır ve soğutmalı santrifüjde 10 dk 1500 g'de santrifüj edilir. Süpernatant soğuk ortamda gönderilir.	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Piruvat kinaz	EDTA'lı tam kan	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Plasmodium aranması	Kalın ve ince yayma preparatları		Kalın damlası- Periferik yayma	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Plazminojen	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Porfirin	İdrar Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik numune gönderimi yaparken; toplama başlangıcında koruyucu olarak 5 g sodyum karbonat ekleyin.	5 mL	HPLC	Çarşamba saat 13:00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi Saat 18.00
≠ Porfobilinojen	İdrar Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir.	5 mL	EİA	Çarşamba saat 13:00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi Saat 18.00
≠ Post prandial kan şekeri (Tokluk Kan Şekeri)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Potasyum	Serum	1 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Prealbumin	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ Primidone	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Pro-BNP(Pro-Brain Natriuretic Peptide)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Progesteron	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Prokalsitonin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Prolaktin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Prostat Spesifik antijen (Total PSA)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Prostat Spesifik antijen (Serbest PSA)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Prostatik asit fosfataz (PAP)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Protein C aktivite	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Protein C antijen	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Protein elektroforezi (idrar)	Spot idrar	10 mL	Elektroforez	Cuma (Saat 10:00 'a kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	İki gün sonra saat 18:00
* Protein elektroforezi (serum)	Serum	1 mL	Elektroforez	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Protein S aktivite	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Protein S antijen	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Protrombin zamanı (PTZ)	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Pseudokolin esterase	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
PTH (Parathormon)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Quantiferon-TB Gold (Antijene özgün sitotoksik yanıt, tetramer ile)	Özel tüplerine alınır Laboratuvarından temin edilecek olan quantiferon gönderim prosedürüne uygun gönderim prosedürüne uygun olarak gönderilmelidir.			Hafta içi hergün(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) Eğer numuneler inkübe edilmeden gönderilirse testin çalışılması bir sonraki çalışma gününe kalır	İki gün sonra saat 18:00
Redüktan madde (gaita)	Gaita	5 g	Kimyasal	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Redüktan madde (İdrar)	Spot İdrar	10 mL	Kimyasal	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	7 gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Renin	EDTA'lı plazma	3 mL	RİA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma	Dört iş günü sonra saat 18:00
Retikülosit	EDTA'lı plazma	3 mL	Manuel	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
* Reverse T3	Serum	1 mL	EİA	Cuma (Perşembe saat 10:00 'a kadar gelen numuneler kabul edilir)	Dört gün sonra saat 18:00
* Retinol Binding Protein (RBP)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Rotavirüs antijeni (Gaita)	Gaita	5 g	İmmuno kromotografik	Hafta içi hergün(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) Eğer numuneler inkübe edilmeden gönderilirse testin çalışılması bir sonraki çalışma gününe kalır	Ertesi gün saat 18:00
* RSV IgA	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ RSV IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ RSV IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Rubella IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Rubella IgG avidite	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10:00 'a kadar gelen numuneler kabul edilir)	İki gün sonra saat 18:00
Rubella IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Saçlı Deride Mantar Aranması	Saçlı deri kazıntısı		Mikroskopik	Hafta içi hergün	On gün içerisinde saat 18:00
Saçta Mantar Aranması	Saç teli		Mikroskopik	Hafta içi hergün	On gün içerisinde saat 18:00
≠ Safra Asitleri	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Salisilat (Salisilik asit)	Serum	1 mL	HPLC	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra saat 18:00
Sedimentasyon (1 saat)	Sitratlı Kan		Kapalı sistem	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Seks Hormon Bağlayıcı Globulin(SHBG)	Serum	1 mL	CMiA	Hafta içi hergün(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Selenyum	Serum	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
Selofan Bant (Oksiyur Yumurtası Aranması)	laboratuvara danışınız				
* Serotonin	Serum, Tam Kan, EDTA'lı Plazma 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hıyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık,ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir	3 mL	HPLC	Pazartesi, (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
* Serotonin	İdrar (Spot, 24 saat) (%50 Asetik asit üzerine İdrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır)	5 mL	ICP-MS	Pazartesi, Perşembe(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

	Hastalar, toplamadan önce ya da 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hıyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık,ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir.				
≠ Seruloplazmin	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Siklosporin A	EDTA'lı tam kan	3 mL	LC-MS-MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Pazartesi-Çarşamba gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra saat 18:00
≠ Sirolimus (Rapamune)	EDTA'lı tam kan	3 mL	LC-MS-MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Pazartesi-Çarşamba gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra saat 18:00
≠ Sistatin C	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Sistin	İdrar (Spot- 24 Saatlik)	5 mL	LC-MS-MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Pazartesi-Çarşamba gününden sonra gelen numuneler)	Üç iş günü sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Sitrat	İdrar (Spot- 24 Saatlik)	5 mL	LC-MS-MS	Pazartesi, (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra saat 18:00
Sodyum	Serum	1 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Sodyum (İdrar)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	3 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Soğuk aglütininer	Serum + Tam Kan (3 ml)	3 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra saat 18:00
* Soluble Liver Antigen (SLA)	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
* Solunum yolu patojen paneli	Üst solunum yolu örnekleri (Nazofaringeal swab, Faringeal swab, Bronkoalveoler lavaj(BAL), Minimum hacim 1 mL viral taşıma ortamında(VTM)		PCR	Pazartesi 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki hafta çalışılır	Perşembe saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Somatomedin C (IGF-1)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Sperm morfolojisi (Kruger)	Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir)		Mikroskopik (özel boyama ile)	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	4 gün sonra
Spermiyogram	Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir)		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
* Spesifik IgE C1 (Penisilol G)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE C2 (Penisilol V)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE C203 (Ampisillin)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE C204 (Amoksisillin)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus)	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE E1 (Kedi epiteli ve kılı)	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE D2 (Dermatophagoides farinae)	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE DP1 MİTE (Akar) Karışımı -D1 Dermatophagoides p. -D2 Dermatophagoides farinae -D3 Dermatophagoides m. -D71 Lepidoglyphus destructor -D72 Tyrophagus putrescentiae -D73 Glycyphagus domesticus -D74 Euroglyphus maynei -D201 Blomia tropicalis-D2 Dermatophagoides farinae -D3 Dermatophagoides m. -D71 Lepidoglyphus destructor	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE E5, Köpek Tüyü	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE EP1 Hayvan Tüyleri Karışımı - E1 Kedi Tüyü-Epiteli - E3 At Tüyü	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

- E4 İnek Tüyü - E5 Köpek Tüyü				bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE EP2 Hayvan Tüyları Karışımı - E1 Kedi Tüyü-Epiteli - E5 Köpek Tüyü - E6 Hint Domuzu Tüyü - E87 Sıçan Tüyü - E88 Fare Tüyü	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE EP71 Hayvan Tüyları Karışımı -E70 Kaz Tüyü -E85 Tavuk Tüyü -E86 Ördek Tüyü -E89 Hindi Tüyü	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE EP72 Hayvan Tüyları Karışımı - E78 Muhabbet kuşu Tüyü - E213 Papağan Tüyü - E201 Kanarya Tüyü - E214 İspinoz Tüyü	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F10 Susam	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F1 Yumurta Akı	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F245 Yumurta	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE F75 Yumurta sarısı	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F247 Bal	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F105 Çikolata	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F11 Karabuğday	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F309 Nohut	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F315 Taze Fasülye	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F13 Yerfıstığı	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE F93 Kakao	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F14 Soya Fasulyesi	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F17 Fındık	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F20 Badem	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F253 Çam Fıstığı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F256 Ceviz	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F2 İnek sütü	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

*Spesifik IgE F204 Ala Balık	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F233 Ovomucoid	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F25 domates	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F244 Salatalık	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F47 Sarımsak	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F27 sığır eti	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F35 Patates	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE F4 Buğday	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F409 Keçi sütü	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F360 Yoğurt	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F41 Somon	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F44 Çilek	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F242 Kiraz	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F33- Portakal	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE F84 Kivi	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F92 Muz	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F95 Şeftali	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F45 Baker's Yeast (ekmek mayası)	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F4 Buğday Unu	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F5 Çavdar Unu	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F76 Alfa laktalbümin	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE F77 Beta laktoglobülin	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F78 Kazein	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F79 Gluten	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F8 mısır	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F83 Tavuk eti	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F26 Domuz Eti	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE F27 Kırmızı Et	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ Spesifik IgE F88- Koyun Eti	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP7 Beslenme Tarama - F1 Yumurta Akı - F2 Süt - F4 Buğday - F9 Pirinç - F13 Yerfıstığı - F14 Soya fasulyesi	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP1 Kuruyemiş Karışımı - F13 Yerfıstığı - F17 Fındık - F18 Brezilya Fındığı - F20 Badem - F36 Hindistan Cevizi	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP13 Sebze Gıda Karışımı - F12 Yeşil Bezelye - F15 Beyaz Fasulye - F31 Havuç - F35 Patates	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP15 Meyve Karışımı - F33 Portakal - F49 Elma - F92 Muz - F95 Seftali	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP2- Balık Paneli - F3 MorinaBalığı - F24 Karides - F37 Kara Kabuk Midyesi - F40 TonBalığı - F41 Somon	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ Spesifik IgE FP3 Hububat Karışımı - F4 Buğday - F7 Yulaf - F8 Mısır - F10 Susam tohumu - F11 Karabuğday	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F9 Pirinç	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP73 Gıda Et Paneli - F26 Domuz Eti - F27 Sığır Eti - F83 Tavuk Eti - F88 Koyun Eti	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE GP1 Çayır (Ot-Polen) Karışımı - G3 Meyve Otu - G4 Çayır Otu - G5 Delice Otu - G6 Timoti Otu - G8 Çayır Salkım Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE GP2 Çayır (Ot-Polen) Karışımı -G2 Domuz ayrığı Otu -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu -G8 Çayır Salkım Otu -G10 Darı Otu -G17 Bahia Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE GP3 Çimen paneli -G1 Kokulu Yonca -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

-G12 Çavdar -G13 Kadife Çimi				bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE HP1 Toz Karışımı - D1 Dermatophagoides p. - D2 Dermatophagoides farinae - H1 Ev Tozu - I6 Hamam Böceği	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE IP8 Solunum Tarama - D1 Dermatophagoides p. - E1 Kedi Tüyü- Epiteli - E5 Köpek Tüyü - G6 Timoti Otu - G12 Çavdar - M2 Cladosporium herbarum - T3 Hus Ağacı - W6 Mist Otu	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE H2 Ev Tozu	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE I1 Bal Arısı zehri	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE I2 Eşekarısı	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE I3 Yaban Arısı zehri	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE I2 Eşekarısı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE I4 Sarıca Arı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE I5 Sarı Eşekarısı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IGE I77 Avrupa Kağıt Yaban arısı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE I6 Hamam böceği	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE I71 sivrisinek	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE İnhalant Paneli – 8 - D1 dermatophagoides pteronyssinus - E1 Kedi Tüyü-epiteli - E5 Köpek Tüyü	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

- G6 Timoti otu -G12 Çavdar - M2 Cladosporium herbarum - T3 Hus ağacı - W6 mist otu					
≠ Spesifik IgE K82 latex	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE Küf Paneli – 1 - M1 Penicillium notatum - M2 Cladosporium herbarum -M3 Aspergillus fumigatus - M5 Candida albicans - M6 Alternaria tenuis	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE M1 Penicillium notatum	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE M207 Aspergillus niger	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE M3 Aspergillus fumigatus	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE M5 Candida albicans	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Spesifik IgE M2 Cladosporium herbarum	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE M6 Alternaria Alternaria(A. Tenuis)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE M6 Alternaria Alternaria(A. Tenuis)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE W6 Mugwort (Mist otu)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE W6 Mugwort (Mist otu)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE P1- Ascaris	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE MP1 Küf Karışımı - M1 Penicillium notatum - M2 Cladosporium herbarum - M3 Aspergillus fumigatus - M5 Candida albicans	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

- M6 Alternaria Alternaria (A. Tenuis)					
≠ Spesifik IgE Toz Paneli - 1 - D1 dermatophagoides pteronyssinus - H1 Ev Tozu - D2 dermatophagoides farinae - I6 Hamam böceği	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE WP1 Yabani Ot Karışımı - W1 Kanarya Otu - W6 Mist Otu - W9 Dar yapraklı sinir Otu - W10 Ak kaz ayağı Otu - W11 Rus Deve Dikeni Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE WP3 Yabani Ot Karışımı - W6 Mist Otu - W9 Dar yapraklı sinir Otu - W10 Ak kaz ayağı Otu - W12 Altın basak Otu - W20 Isırgan Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE TP1 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T3 Hus Ağacı - T7 Mese Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T10 Ceviz Ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE TP1 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T3 Hus Ağacı - T7 Mese Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T10 Ceviz Ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE TP2 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T7 Mese Ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

- T8 Karaağaç Ağacı - T14 Kavak - T22 Alıç				bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Spesifik IgE T11 Çınar ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE TP5 Ağaç Karışımı - T2 Kızıl Ağaç - T4 Fındık Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T12 Söğüt Ağacı - T14 Kavak Ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE TP7 Ağaç Karışımı - T9 Zeytin Ağacı - T12 Söğüt Ağacı - T16 Beyaz Çam Ağacı - T18 Ökalyptus Ağacı - T19 Akasya Ağacı - T21 Melaluka Ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE T12 Söğüt Ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE T14 Kavak	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Spesifik IgE T9 Zeytin ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* SS-A (Anti Ro) Antikoru	Serum	1 mL	Immunblot - EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 10:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 10:00)	İki gün sonra saat 18:00
*SS-B (Anti -La) Antikoru	Serum	1 mL	Immunblot - EIA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 10:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 10:00)	İki gün sonra saat 18:00
* Şeker kromatografisi (İdrar)	İdrar	2 mL	RIA	Hafta içi hergün	Bir hafta sonra saat: 18:00
* T3 Total (triiodotironin)	Serum	1 mL	CMiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* T4 Total (Tetraiodotironin)	Serum	1 mL	CMiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
* Takrolimus (FK 506)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	LC-MS-MS	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, perşembe günü	Üç gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	
* Talyum	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	3 mL	AAS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
* TCA (Trikloro Asetikasit)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	3 mL	AAS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
* TCE (Trikloroetilen)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	3 mL	AAS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
* Teofilin	Serum	1 mL	CLiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Testosteron (serbest)	Serum	1 mL	ELİSA	Salı, Cuma saat:12.00(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 15:00
Testosteron (Total)	Serum	1 mL	ECLiA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
* Tetanoz antikor	Serum	1 mL	EIA	Salı saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Tırnakta mantar Aranması	Tırnak		Mikroskopik	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
Tiroglobulin (Tg)	Serum	1 mL	ECLiA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Tiroid Stimule Edici Immunglobulin (TSI)	Serum	1 mL	RIA	Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00(Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat. 18:00
* Tiroksin bağlayan globulin (TBG)	Serum	1 mL	CMiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat. 18:00
* Titanyum	Serum (Lacivert kapaklı tüp)	1 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18:00
* Toluen	İdrar	2 mL	GC-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
* Topiramat	Serum	3mL	LC-MS-MS	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 10:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 10:00)	İki gün sonra saat 18:00
* Total antioksidan aktivite	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* Total oksidan aktivite	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Total Protein	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Total Protein (İdrar)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	4 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Toksoplazma IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
* Toksoplazma IgG Avidite Testi	Serum	1 mL	ELFA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat. 18:00
Toksoplazma IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Transferrin	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Transferrin Satürasyonu	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
≠ Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA)	Serum	1 mL	CMiA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat: 18:00
Trichomonas Aranması	Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Trigliserid	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
≠ Triptaz	Serum	1 mL	FEiA	15 günde bir Pazartesi çalışılır	Ertesi Gün Saat: 18:00
≠ Trombin zamanı	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Trombosit fonksiyon agregasyon testleri (kollajen, ADP, epinefrin, ristosetin olarak 4 ayrı test çalışılır)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Çarşamba saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Troponin I	Serum	1 mL	ECLiA	Hafta içi hergün	Aynı gün 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

TSH (Tiroid Stimulan Hormon)	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
* TSH Reseptör Antikoru	Serum	1 mL	RIA	Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat:12.00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18:00
* t-t Mukonik asit	laboratuvara danışınız				
Ureaplasma Urealitikum Kültürü	Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen		Kültür	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18:00
Uyuşturucu Paneli (Amfetaminler,kokain, marijuana, benzodiazepin, ecstasy, trydydic, antidepresanlar, barbitüat, metamfetamin, morfin, metadon)	İdrar	5 mL	Strip	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Üçlü Tarama Testi (İkinci Trimester Tarama Testi)	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Üre (BUN)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Üre (İdrar)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	4 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen	Aynı gün 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Üretral Akıntı Kültürü	Üretral akıntı		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Ürik Asit	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Ürik Asit (İdrar)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	4 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Vajinal Kültür	Vajinal -servikal swab		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Valproik asit	Serum	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
* Vanil mandelik asit (VMA)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	3 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Onbeş iş günü sonra saat 18:00
Vankomisin	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00,	Üç gün sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				Perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	
* Varicella zoster virus (VZV) Ig G	Serum	1 mL	EIA	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki iş günü sonra saat 18:00
* Varicella zoster virus (VZV) Ig M	Serum	1 mL	EIA	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki iş günü sonra saat 18:00
VDRL Kart Test (RPR)	Serum	1 mL	İmmuno kromotografik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
* Vitamin A (Retinol)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Pazartesi saat 13:00 (Cumartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
* Vitamin B1 (Tiamin)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	HPLC	Perşembe saat 13:00 (Çarşamba gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Salı günü saat 18:00
Vitamin B12 (Siyanokobalamin)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
* Vitamin B2 (Riboflavin)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	HPLC	Perşembe saat 13:00 (Çarşamba	Salı günü saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
* Vitamin B6 (Pridoksal fosfat)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	HPLC	Perşembe saat 13:00 (Çarşamba gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Salı günü saat 18:00
* Vitamin C (Askorbik asit)	Heparinli Plazma, (Çöktürülmüş plazma; %10'luk methafosforik asit 1:1 oranında ilave edilir santrifüj edilip üst faz alınır dondurularak gönderilir - 1 mL (min 0.5 mL)	3 mL	HPLC	Pazartesi saat 13:00 (Cumartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
* Vitamin E (Alfa-tokoferol)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Pazartesi saat 13:00 (Cumartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
* Vitamin H (Biotin)	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki iş günü sonra saat 18:00
* Von Willebrand faktör aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)	Sitratlı Plazma	2 mL	Koagülo-metrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki iş günü sonra saat 18:00
* Von Willebrand faktör antijeni	Sitratlı Plazma	2 mL	Koagülo-metrik	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler	İki iş günü sonra saat 18:00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				bir sonraki çalışmaya kalır)	
Yara Kültürü	Kültür Materyali		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
* Yenidoğan Taraması (Tandem MS)	Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire) Erken teşhisin faydasını en üst düzeye çıkarmak için, örnek 12 saatten sonra ve 1 haftalıktan önce mümkün olduğunca erken toplanmalıdır		LC-MS-MS	Pazartesi-Cuma (saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 18:00

Test Adı	Numune Türü ve Miktarı	Metot	Çalışma Günleri	Rapor Tarihi
* Adenovirus DNA PCR (Kantitatif)	Vücut sıvısı- Serum	PCT	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	14 gün sonra
* Alfa Talasemi (HBA1, HBA2 ve HBZ genleri) (Delesyon Analizi - MLPA)	Edtalı tam kan	PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	20 Gün
* Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi	Amniyon sıvısı	HRB	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün
* Beta Talasemi (HBB geni) (Tüm Gen - Dizi Analizi)	Edtalı tam kan	PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir	30 Gün

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				sonraki çalışmaya kalır)	
* BRCA1 Gen Mutasyonu	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	30 Gün
* BRCA2 Gen Mutasyonu	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	30 Gün
* Chlamydia Real Time PCR	İdrar		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
* Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paneli (Üretrit Panel)	Üretral Akıntı-İdrar		PCR	Salı- Perşembe-Cumartesi	10 Gün
* CMV DNA	Serum, İdrar, Edtalı		PCR	Salı- Perşembe-Cumartesi	10 Gün
* Düşük Materyalinden Kromozom Analizi	Düşük Materyali		HRB	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün
* EBV DNA PCR Kantitatif	Edta'lı Plazma		PCR	Salı- Perşembe-Cumartesi	15 Gün
* Faktör 5 1299 (Cambridge) / Faktör 5 Leiden)	Edta'lı Kan		PCR	Salı- Perşembe-Cumartesi	15 Gün
* FMF-MEFV Hedef Mutasyon Analiz (12 Mutasyon)	Edta'lı Kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

≠ FMF-MEFV Hedef Mutasyon Analiz (Tüm Gen)	Edta'lı Kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	30 Gün
≠ HBV DNA (PCR)	Serum , EDTA'lı Tam Kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
≠ HCV RNA (PCR)	Serum , EDTA'lı Tam Kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
≠ HDV RNA (PCR)	Serum		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
≠ HIV1 RNA	Serum		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
≠ HLA B5 (51, 52)	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün
≠ HLA B27	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* HLA Tipleme PGT (Haplotip ve Marker Analizleri - Lösemi vb)	Embriyo		CGH	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	20 Gün
* HSV TİP 1-2 DNA	Serum-BOS		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
* Human Papilloma Virus (HPV) Tespit ve Tiplendirme (20TİP)	Vajinal sürüntü / lezyondan biyopsi		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün
* JAK 2 V617 F Kantitatif	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
* Kistik Fibrozis CFTR Hedef Mutasyon Analizi (tüm gen)	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
* Koryonik Villus Örneğinden (CVS) Kromozom Analizi (Panel)	Merkezimizden temin edilen transport besi yeri içinde		GTG Bantlama	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
* Mycoplasma Hominis	Vajinal sürüntü/ İdrar/ Lezyondan Biyopsi		PCR	Salı- Perşembe- Cumartesi	15 Gün

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

* MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C Ve C677T)	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
* NIPT (Non İnvaziy Prenatal Test) Gebelik Tarama Testi	Özel Tüpleri Laboratuvara Danışınız				Laboratuvara Danışınız
* Orak Hücre Anemisi HBB	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
* PAI 14G/5G Polimorfizmi	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	20 Gün
* Parvovirüs B19 DNA	Vajinal sürüntü/ İdrar/ Lezyondan Biyopsi /Serum		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün
* Periferik Kandan Kromozom Analizi	Heparinli, Yeşil Kapak		HRB Bantlama	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	20 Gün
* Prenatal Tanı (Rapid FISH) Amniyon (13,18,21,X,Y)	Amniyon sıvısı,kord kanından,koryon villus biyopsisi, fetal kan materyalinden		Direkt Hücre	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün
* Protrombin (G20210A) Mutasyon Analizi	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen	15 Gün

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Sperm DNA Fragmentasyon	Ejekülat		TB	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
≠ Toksoplazma DNA	EDTA'lı Tam Kan, Serum, Amniyon Sıvısı		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 Gün
≠ TORCH Paneli (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV)	EDTA'lı Tam Kan,		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10 Gün
≠ Trombofili Paneli (7'li panel)	EDTA'lı Tam Kan,		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	20 Gün
≠ Tüm Exom(Gen) Analizi	EDTA'lı Tam Kan,		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	20 Gün

≠ işareti olan testler dış laboratuvarda çalışılmaktadır.

BU TABLODA BULAMADIĞINIZ TESTLER İÇİN LÜTFEN LABORATUVAR İLE İLETİŞİME GEÇİN.

Saat 15.00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki güne ait çalışmaya kalır.

ACİL ÇALIŞILMASI TALEBİ İLE GELEN NUMUNELER İÇİN LABORATUVARIMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞILIYOR İSE NUMUNE GELDİKTEN ÜÇ SAAT SONRA SONUÇ VERİLİR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

Önemli not: Yukarıda verilen sonuç tarihleri, laboratuvarıdan (cihaz arızası, otomasyon arızaları v.b) ya da numuneden kaynaklanan bir problem (yetersiz, uygunsuzluk v.b) durumunda değişebilir. Bu durumda ilgili hastanenin sekreterlikleri ve kurum yetkilileri bilgilendirilir.

9. DIŞ LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TESTLER

- ✓ Laboratuvarında çalışmadığımız testler anlaşmalı olduğumuz Dış Laboratuvarıda çalışılmaktadır.
- ✓ Dış Laboratuvarıda çalışılan testler HBYS’de tanımlı olup Dış Laboratuvar barkoduyla çıkar.
- ✓ Numuneler Dış Laboratuvar test kataloguna göre alınır ve Laboratuvara gönderilir.
- ✓ Numuneler Laboratuvara gelince ‘Örnek kabul red kriteri talimatı’ na göre kabul edilir.
- ✓ Numuneler uygun saklama koşullarında saklanır ve ‘Dış Laboratuvara gönderilen numune kayıt defteri’ ne kaydedilir. Numuneler numune kabulde görevli teknisyen tarafından Pazar günü hariç her gün gelen dış Laboratuvar kuryesine teslim edilir.
- ✓ Sonuçlar Numuneler numune kabul elemanları tarafından ya otomasyondan alınır ya da kuryenin getirdiği raporlardan HBYS’ye yazılır.

REVİZYON NO/TARİHİ	MADDE NO	ÇIKAN/DEĞİŞEN/EKLENEN METİN
<u>1</u> / 16.11.2018	Genel	Elektronik Nüsha. Basılmış Hali Kontrolsuz Kopyadır.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

<u>2</u> / 25.02.2019	Genel	İçindekiler Eklenmiş Başlıkların Tipi Değiştirilmiştir.
<u>2</u> / 25.02.2019	Madde 8	Patoloji Bölümü Eklendi
<u>3</u> / 25.03.2019	Çalışılan Testler Tablosu	Tüm Testlerin Çalışma Saatleri Ve Sonuç Süreleri Değiştirildi.
<u>4</u> / 25.06.2019	Madde 5.3 Örnek Akışı	Ayaktan laboratuvara hasta kabulü yapılmamakta, bireysel hastadan kan alınmamaktadır. İbaresesi eklendi
<u>5</u> / 25.06.2019	Genel	Sayfa Sayıları Üst Kısımda X/Y Olarak Güncellendi
<u>6</u> / 21.09.2020	Genel	Tüm Test Listesi Güncellendi
7/15.10.2020	Genel	Sayfanın yapısı değiştirildi.
	Madde 5.3 Örnek Akışı	<i>"5.3.3. Ayaktan Gelen Hastalar</i> Laboratuvarımızda randevu sistemi uygulanmaktadır, özellikle covid PCR testi yaptıracak hastalar randevu ile kabul edilmektedir. Labortuvarımızın yoğunluğuna göre randevusuz bireysel hasta kabulü de yapılmaktadır." İbaresesi eklendi
8/25.08.21	Test tablosu	Test çıkma zamanları ve numune türleri revize edilmiş yeni testler eklenmiştir
9/10.01.2022	5.3 Örnek akışı	Hastane yerine Lokman hekim hastanesi ifadesi eklendi Diğer kurumlardan gelen numuneler ya test istem formu ile ya da yazılımımız üzerinden kayıt yapılarak tarafımıza gönderilir ifadesi eklendi.
	5.3.1 maddesi	Madde çıkarıldı Test istem formu ile gelen numuneler Numune Kayıt elemanları tarafından kayıt yapıp barkod basılıp laboratuvarın ilgili bölümüne verilir ifadesi eklendi Kurumsal kayıt ile ilgili videoya www.alab.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.ifadesi eklendi

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

	5.3.2. Dış Merkezli Kurumlardan Gelen Numuneler	Portör, hemşirelerden teslim alacakları numuneleri uygun taşıma kaplarında (kapalı, sızdırmaz ve darbeye dayanıklı), en kısa sürede (en geç ½ saat içerisinde) laboratuvara ulaştırmalıdır. Portör taşıma kaplarını sallamadan, düzgün bir pozisyonda taşınmalıdır. Acil çalışılması istenen numuneler hiç bekletilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır. Portör, laboratuvara geldiğinde numuneleri numune kabulde görevli Laboratuvar teknisyenine teslim eder. Taşıma sırasında eldiven giyilmelidir. Kabın dışına bulaş olmuşsa kap değiştirilmeli, bu mümkün değilse kabın dışı dezenfektan bir solüsyon ile temizlenmelidir. İfadesi çıkarıldı.
	Madde 5.15	Gelen numune servisten ise Servis sorumlu hemşiresi ve Poliklinikten ise; poliklinik sekreterine ve/veya hemşiresine haber verir ve hastadan tekrar numune alınmasını ister. "Uygunsuz Numune Bildirim Formuna kaydını yapar. İfadesi çıkarıldı. Numune Kabul-Ayırma elemanları tarafından kurum yetkilisine sözlü bildirim yapılır sistem üzerinden numune ret işlemi gerçekleştirilir ifadesi eklendi
	Madde 5.16	Biyokimya testleri; ortalama 3 saat sonra verilebilir. Acil durumlarda mümkün olduğunca en kısa sürede verilmeye çalışılır. Cihazlarda oluşabilecek teknik arıza durumlarında bu süreler dikkate alınmaz. Verilen süreler örneklerin laboratuvara gelişle başlar. İdrar testleri; tam idrar 2 saat sonra acil durumda 30 dakikada verilebilir. İdrarda biyokimyasal parametreler (kreatinin, kalsiyum vb.) 3 saat sonra verilebilir. Hematolojik tetkikler; Tam Kan Sayımı 3 Saat (Acil 60 Dakika) Ptz 3 Saat (Acil 60 Dakika) Aptt 3 Saat Sedimentasyon 2 Saat (Acil 60 Dakika)
	Madde 5.19	Hormon Testleri; bu grup testler ortalama 4 saat sonra verilebilir. Test sayısına göre süre artabilir veya azalabilir. Acil durumlarda mümkün olduğunca en kısa sürede verilmeye çalışılır. Cihazlarda oluşabilecek teknik arıza durumlarında bu süreler dikkate alınmaz. Verilen süreler örneklerin laboratuvara gelişle başlar. İfadesi çıkarıldı
	Test tablosu	Test çıkma zamanları ve numune türleri revize edilmiş yeni testler eklenmiştir

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------

	TEST KATALOĞU			
	Doküman No	AL-TEK TK 01	Yürürlük Tarihi	12.01.2018
	Revizyon Numarası	10	Revizyon Tarihi	1.03.2022

	Patoloji bölümü	Bölüm tamamen çıkarılmıştır.
10/01.03.2022	1. Giriş/2. Amaç /3.Kapsam/ 4.Sorumlular/5. Faaliyet akışı/ Madde 5.1 5.2 5.3 5.11 5.13 5.14 5.15 5.16 5.18	Hepsi Çıkarıldı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Hazırlayan: Akif YILMAZ	Kontrol Eden: Bağdagül ÇAKIR	Onaylayan: Fatih BAKIR
-------------------------	------------------------------	------------------------